



Kom i gang
med
Omnipod® 5

omnipod[®]
automated insulin
delivery system
5

Vi er glade for, at du har valgt Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System, som kan anvendes med de førende sensorer på markedet*.



Læs denne brochure grundigt igennem. Det er den sikreste måde at komme godt i gang med Omnipod 5 på.



*Kompatibel med Dexcom G6- og FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer.

1. Før undervisningen

Hvis du skal bruge Dexcom G6

Før undervisningen i Omnipod 5-systemet skal du i gang med Dexcom G6 og bruge Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone‡.

Hvis du i øjeblikket bruger Dexcom-modtageren, skal du også downloade Dexcom G6-appen til iOS eller Android.

Hvis du skal bruge FreeStyle Libre 2 Plus

Du skal have modtaget undervisning i at bruge en FreeStyle Libre-sensor.

Din behandler skal have ordineret FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer til dig. Tag en ny, uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor med til Omnipod 5-undervisningen‡.




Omnipod-ID

Det er vigtigt, at du opretter dit Omnipod-ID før undervisningen i Omnipod 5.

- ➡ Gå til www.omnipod.com/setup, og opret et Omnipod-ID
- ➡ Det er vigtigt, at du husker dit Omnipod-ID og din adgangskode, da du skal bruge dem til at logge ind på Omnipod 5 Kontrolenheden i løbet af undervisningen.
- ➡ Hvis du er behandler og installerer appen for en patient, som du har behandlingsansvaret for, skal du oprette et Omnipod-ID til personen.
- ➡ Gennemgå skærbillederne om samtykke, hvor du finder information om behandlingen af dine personoplysninger.

Dit Omnipod-ID er klar, når du ser bekræftelsesmeddelelsen.

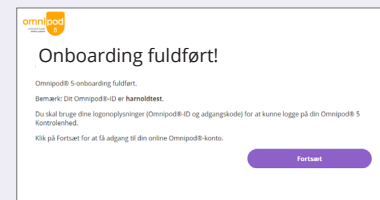

‡ FreeStyle Libre 2 Plus- og Dexcom G6-sensorene ordineres separat. Dexcom G6-sensoren skal anvendes med Dexcom G6-appen til mobiltelefon. Dexcom G6-modtageren er ikke kompatibel.

Forbind med Glooko®

Glooko er platformen til håndtering af data fra Omnipod 5. Med den kan du:

- Se glukose- og insulindata
- Dele realtidsdata med dine behandlere som pålideligt grundlag for justeringer af systemet
- ☞ Hvis din behandler skal kunne se dine glukose- og insulindata, skal du forbinde dit Omnipod-ID med din Glooko-konto.
Hvis du ikke har en Glooko-konto, kan du oprette en, når du installerer Omnipod-systemet.
- ☞ Bed din behandler om klinikkens ProConnect-kode, så du kan dele dine diabetesdata.

ProConnect-kode:

Nu er du klar til at starte din undervisning i at bruge Omnipod 5!



2. På undervisningsdagen

Som forberedelse til at tage Omnipod 5 i brug skal du følge vejledningen fra din behandler om ændringer i din nuværende behandling, blandt andet skriftlig information om justeringer af insulinbehandlingen. Dette er et krav, for at du kan deltage i digital start af Omnipod 5.

Omnipod 5 Startset

- ☞ Hvis du får undervisning digitalt, skal du på forhånd have et Omnipod 5 Startset og en æske med Omnipod 5 Pods. Du skal også bruge et hætteglas med hurtigtvirkende insulin, som din behandler ordinerer.

ELLER

- ☞ Hvis du får undervisning på sygehuset, skal du tjekke med behandleren, at du får dit Omnipod 5 Startset og æske med Omnipod 5 Pods, når undervisningen begynder, eller at det bliver sendt hjem til dig, så du kan tage det med til undervisningen. Husk at medbringe det hurtigtvirkende insulin, du har fået ordineret til brug med Omnipod 5.

Hvis du venter på at få dit Omnipod 5 Startset og Pods, og de ikke er kommet 3 dage før undervisningen, skal du kontakte det sted, der har ansvaret for at bestille og levere tilbehør i din region.

Sensorer

Dexcom G6-sensor

- ☞ Når du kommer til undervisningen, skal du bære en aktiv Dexcom G6-sensor, som bruger Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone. Du skal også omhyggeligt kontrollere, at din modtager er slukket.


FreeStyle Libre 2 Plus-sensor

- ☞ Kontrollér, at behandleren har ordineret FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer til dig.
- ☞ Tag en ny, uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor med til Omnipod 5-undervisningen.

Insulin

- ☞ Husk at medbringe et hætteglas med hurtigtvirkende insulin* til træningen.

Eksempler på placering af Pod og Sensor*

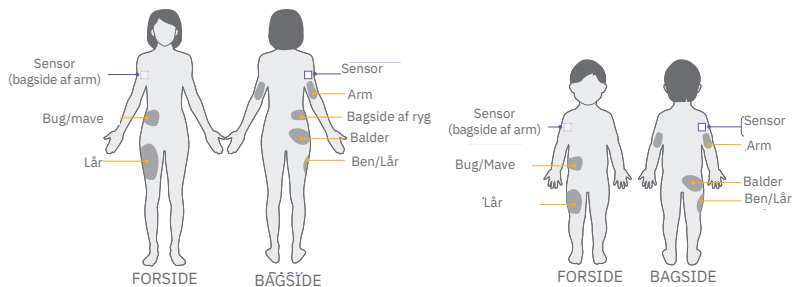

*Eksemplerne på placering af Pod'en bygger på, at Sensoren fastgøres på bagsiden af armen.

I brugervejledningen til sensorsystemet er der mere information om godkendte placeringer af Sensoren.

Et godt råd: Tænk allerede fra start over, at Pod'en og Sensoren bør placeres, så der er fri synslinje mellem dem for den bedst mulige forbindelse. Fri synslinje betyder, at Pod'en og Sensoren skal bæres på samme side af kroppen, så de to enheder kan "se" hinanden, uden at kroppen blokerer for kommunikationen imellem dem.



*NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi®, Kirsty® og Admelog®/Insulin lispro Sanofi® er kompatible med Omnipod 5-systemet til brug op til 72 timer (3 dage).

3. Tjekliste og ressourcer

Tjekliste

- Har du oprettet et Omnipod-ID og en adgangskode?
- Har du fået bekræftelse på skærmen på, at du har gennemført forberedelserne? Har du fået en bekræftende e-mail?
- Har du et hætteglas med hurtigtvirkende insulin klar til undervisningen?
- Har du en aktiv Dexcom G6-sensor koblet til Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone, og har du kontrolleret, at din modtager er slukket?
ELLER
- Har du en uåbnet FreeStyle Libre 2 Plus-sensor, som er klar til at blive aktiveret i forbindelse med undervisningen?
- Har du skrevet indstillingerne til din insulinpumpe ned? Det er et krav til den digitale undervisning i at bruge Omnipod 5. Du skal have modtaget instruktioner om indstillingerne til insulinpumpen fra din behandler.

Hvis du har spørgsmål til din behandling, skal du henvende dig til dit diabetesteam.

*Din samtale kan blive overvåget og optaget med henblik på kvalitetssikring.

©2024 Insulet Corporation. (Producent) Omnipod, Omnipod-logotypen Simplify Life og Podder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Insulet Corporation i USA og andre retsområder. Med eneret. Dexcom og Dexcom G6 er registrerede varemærker, som tilhører Dexcom, Inc. og anvendes med tilladelse. Sensor housing, FreeStyle, Libre og relaterede varemærker tilhører Abbott og anvendes med tilladelse. Glooko er et varemærke, som tilhører Glooko, Inc. og anvendes med tilladelse. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. www.myomnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745. INS-OHS-07-2024-00059 OMNI.DK.080-01-JUN2024



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk
facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | [@makingdiabeteseasier_dk](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_dk)
NordicInfu Care AB (Distributør) · Industrivej 21, 4000 Roskilde · telefon 70 28 10 24 · www.infucare.com

Ressourcer

- For at du kan være helt forberedt til undervisningen i at bruge Omnipod 5, skal du helst bruge de digitale undervisningsressourcer til Omnipod 5 før produktundervisningen. Følg anvisningerne fra din behandler om de digitale ressourcer.



Ressourcerne til onlinetræning findes på [TBC]



Hvis du har spørgsmål om dit Omnipod-ID eller Omnipod 5-system, som du ikke får svar på igennem onlineundervisningen, kan du kontakte Nordic Infucare Omnipod Support på

70 28 10 24*

eller +45 70 28 10 24, hvis du ringer fra udlandet.

