



# Omnipod® 5 -järjestelmän käytön aloittaminen

omnipod<sup>®</sup>  
automated insulin  
delivery system  
5

Kiitos, että valitsit  
Omnipod 5 Automated  
Insulin Delivery System  
-järjestelmän, jota  
voi käyttää yhdessä  
markkinoiden johtavien  
Sensorien kanssa\*.



*Lue tämä seloste huolella,  
jotta Omnipod 5 -järjestelmän  
käyttöönottosi sujuu  
mahdollisimman hyvin.*



\*Yhteensopiva Dexcom G6- ja FreeStyle Libre 2 Plus -Sensorien kanssa.

# 1. Ennen koulutusta

## Jos aiot käyttää Dexcom G6 -Sensoria

Ennen Omnipod 5 -koulutusta sinun on aktivoitava Dexcom G6 -Sensori ja yhdistettävä se Dexcom G6 -sovellukseen yhteensopivassa älypuhelimessa<sup>‡</sup>.

Jos käytät tällä hetkellä Dexcom-Vastaanotinta, lataa älypuhelimeesi Dexcom G6 -sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmälle.

## Jos aiot käyttää FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoria

Sinun on pitänyt saada koulutus FreeStyle Libre -Sensorin käytöstä.


Sinun on pitänyt saada hoitavalta lääkäriltäsi resepti FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoreille. Ota Omnipod 5 -koulutukseen mukaasi uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori<sup>‡</sup>.

## Omnipod-ID

**On tärkeää, että luot Omnipod-ID:n ennen Omnipod 5 -koulutusta.**

- 👉 Luo Omnipod-ID osoitteessa [www.omnipod.com/setup](http://www.omnipod.com/setup)
- 👉 On tärkeää, että muistat Omnipod ID:n ja salasanasasi. Tarvitset niitä, kun kirjaudut Omnipod 5-Ohjaimeen.
- 👉 Jos olet huoltaja, luo Omnipod-ID huollettavallesi.
- 👉 Käy läpi näyttöön tulevat sivut, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä ja suostumustasi siihen.

Omnipod-ID on rekisteröity, kun saat vahvistusviestin.

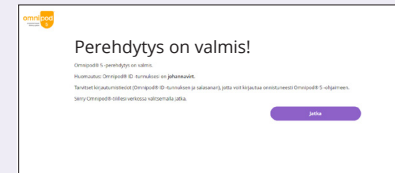

<sup>‡</sup> FreeStyle Libre 2 Plus- ja Dexcom G6 -Sensorit vaativat erillisen reseptin. Dexcom G6 -Sensoria on käytettävä Dexcom G6 -älypuhelinsovelluksen kanssa. Dexcom G6 -Vastaanotin ei ole yhteensopiva Omnipod 5 -järjestelmän kanssa.



## Glooko®-palveluun yhdistäminen

Glooko on sovellus, jota voi käyttää Omnipod 5 -tietojen käsittelyyn. Sen avulla voit:

- tarkastella glukoosi- ja insuliinitietoja
- jakaa tietosi reaaliajassa diabeteshoitotiimin kanssa, jotta tiimi voi olla tukenasi järjestelmän asetusten säätämisessä.
- ☞ Jotta diabeteshoitotiimisi voi nähdä glukoosi- ja insuliinitietosi, sinun on yhdistettävä Omnipod-ID Glooko-tiliin. Jos sinulla ei ole Glooko-tiliä, voit tehdä sen Omnipod-ID:n luomisen jälkeen.
- ☞ Jotta voit jakaa tietosi diabeteshoitotiimisi kanssa, sinun on lisäksi pyydyttävä klinikan ProConnect-koodi.

ProConnect-koodi:

**Olet nyt valmis aloittamaan Omnipod 5 -tuotekoulutuksen!**



## 2. Koulutuspäivänä

Osana Omnipod 5 -järjestelmän käyttöön valmistautumista noudata diabeteshoitotiimisi antamia ohjeita, jotka koskevat muutoksia nykyiseen hoitoosi, mukaan lukien kirjallisia insuliinihoitoa koskevia ohjeita. Tämä on edellytys sähköiseen Omnipod 5 -koulutukseen osallistumiselle.

### Omnipod 5 -Aloituspakkaus

- ☞ **Jos suoritat koulutuksesi verkossa**, sinulle lähetetään Omnipod 5 -Aloituspakkaus ja Omnipod 5 -Pumppuja. Lisäksi tarvitset injektiopullon, joka sisältää hoitavan lääkärisi määräämää nopeavaikutteista insuliinia.

*TAI*

- ☞ **Jos saat koulutuksesi klinikalla**, saat Omnipod 5 -Aloituspakkauksen ja Omnipod 5 -Pumput joko klinikalla koulutuksen alkaessa tai pakkaukset lähetetään sinulle kotiin, jotta voit tuoda ne mukasi koulutukseen. Muista noutaa ja ottaa mukaasi nopeavaikutteinen insuliini, jota sinulle on määrätty Omnipod 5 -hoitoa varten.

Jos odotat Omnipod 5 -Aloituspakkausta ja -Pumppuja eikä niitä ole vielä toimitettu, kun koulutukseen on aikaa 3 päivää, ota yhteyttä tuotteidesi tilauksesta ja toimituksesta vastaavaan yksikköön.

## Sensorit

### Dexcom G6 -Sensori

- ☞ Saavu koulutukseen Dexcom G6 -Sensori aktivoituna ja yhdistettynä yhteensopivan älypuhelimien Dexcom G6 -sovellukseen. Varmista myös, että Dexcom-Vastaanottimesi on suljettuna.


### FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori

- ☞ Varmista, että hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoreita.
- ☞ Ota Omnipod 5 -koulutukseen mukaasi uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori.

## Insuliini

- ☞ Muista ottaa nopeavaikutteista insuliinia\* sisältävä injektioipullo mukaasi koulutukseen.

### Esimerkkejä Pumpun ja Sensorin kiinnityspaikoista\*

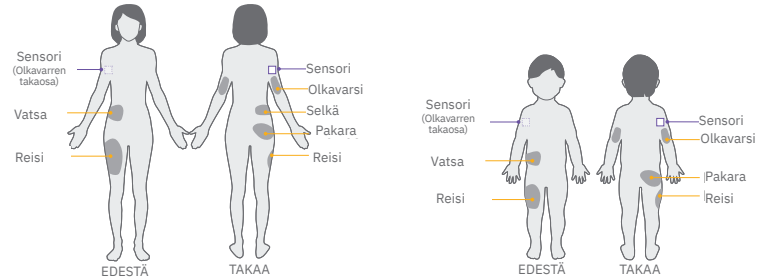

\*Pumpun kiinnityspaikkojen esimerkit perustuvat siihen, että Sensori on kiinnitetty olkavarren takaosaan.

Lisätietoja Sensorin mahdollisista kiinnityspaikoista on Sensorijärjestelmän käyttöohjeessa.

**Vinkki:** Ota huomioon, että Pumpun ja Sensorin välinen yhteys toimii parhaiten, kun laitteilla on "näköyhteys" toisiinsa. Siksi Pumppu ja Sensori on suositeltavaa kiinnittää samalle puolelle kehoa niin, ettei niiden välissä ole kehon muodostamaa estettä.

\*Seuraavat insuliinit ovat yhteensopivia Omnipod 5 -järjestelmän kanssa 72 tunnin (3 vuorokauden) annostelua varten: NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi®, Kirsty® ja Admelog®/Insulin lispro Sanofi®.




# 3. Tarkistuslista ja lisäaineisto

## Tarkistuslista

- Oletko luonut Omnipod-ID:n ja salasanan?
- Oletko saanut näyttöön vahvistuksen siitä, että Omnipod-ID:si rekisteröiminen onnistui? Oletko saanut sähköpostivahvistuksen?
- Onko sinulla nopeavaikutteista insuliinia sisältävä injektiopullo koulutusta varten?
- Onko sinulla aktivoitu Dexcom G6 -Sensori, joka on yhdistetty Dexcom G6 -sovellukseen yhteensopivassa älypuhelimessa ja oletko varmistanut, että Dexcom-Vastaanotin on suljettu?  
TAI
- Onko sinulla uusi, avaamaton FreeStyle Libre 2 Plus -Sensori, jonka voit aktivoida koulutuksen aikana?
- Onko sinulla insuliinipumppusi asetukset kirjallisina? Se on edellytys Omnipod 5 -järjestelmän käyttöä koskevan verkkokoulutuksen saamiselle. Ohjeet insuliinipumppusi asetuksista saat diabeteshoitotiimiltäsi.

## Lisäaineisto

-  Jotta olet mahdollisimman hyvin valmistautunut Omnipod 5 -järjestelmän käyttöön, suosittelemme, että tutustut Omnipod 5 -verkkokoulutusaineistoon diabeteshoitotiimisi ohjeiden mukaan ennen tuotekoulutusta.

**Verkkokoulutusaineisto on saatavilla osoitteessa [TBC]**



Jos sinulla on kysyttävää Omnipod-ID:stä tai Omnipod 5 -järjestelmästä etkä ole saanut riittävää vastausta verkkokoulutusaineistosta, ota yhteyttä Nordic Infucaren Omnipod-asiakaspalveluun soittamalla numeroon

**0207 348 760\***

tai +358 0207 348 760, jos soitat ulkomailta.

**Hoitoasi koskevilla kysymyksissä käänny diabeteshoitotiimisi puoleen.**

\*Puhelusi saatetaan tallentaa laadunvarmistusta varten. Puhelut 0800-alkuisiin numeroihin ovat maksuttomia kiinteistä puhelinliittymistä, mutta mobiiliverkko-operaattorit saattavat periä maksun tällaisista puheluista.

©2024 Insulet Corporation. Valmistaja) Omnipod, Omnipod-logo, Simplify Life ja Podder ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Dexcom ja Dexcom G6 ovat Dexcomin rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään luvalla. Sensorin ulkokuori, FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä, ja niitä käytetään luvalla. Glooko on Glooko, Inc:n tavaramerkki, ja sitä käytetään luvalla. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. [www.myomnipod.com](http://www.myomnipod.com). Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinällisistä laitteista annettun asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti. INS-OHS-07-2024-00058 OMNI.FI.101-01-JUN2024



[diabetesinfucare.com](http://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.fi](http://makingdiabeteseasier.fi)  
[facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi) | [@makingdiabeteseasier\\_fi](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_fi)

NordicInfu Care AB (Jakelija) · Tekniikantie 14 · 02150 Espoo, +358 (0) 207 348 760 · [www.infucare.com](http://www.infucare.com)