



Kom igång med Omnipod® 5

omnipod[®]
automated insulin
delivery system
5

Vi är glada att du har valt Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System, som går att använda med de ledande sensorerna på marknaden*.



Läs och följ instruktionerna i den här broschyren noga. Det är det säkraste sättet att komma igång med Omnipod 5 på ett bra sätt.



*Kompatibelt med Dexcom G6- och FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer.

1. Före utbildningen

Om du ska använda Dexcom G6

Före utbildningen om Omnipod 5-systemet behöver du komma igång med Dexcom G6 och använda Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone[‡].

Om du redan idag använder Dexcom med enbart mottagaren behöver du ladda ner och starta upp med Dexcom G6-appen för iOS eller Android.

Om du ska använda FreeStyle Libre 2 Plus

Du ska ha fått utbildning i att använda en FreeStyle Libre-sensor.


Din vårdgivare ska ha skrivit ut FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer åt dig. Ta med en ny, öppnad FreeStyle Libre 2 Plus-sensor till Omnipod 5-utbildningen[‡].

Omnipod-ID

Det är viktigt att du skapar ditt Omnipod-ID före utbildningen om Omnipod 5.

- ☞ Gå till www.omnipod.com/setup och skapa ett Omnipod-ID
- ☞ Det är viktigt att du kommer ihåg ditt Omnipod-ID och lösenord eftersom du ska använda dem för att logga in på din Omnipod 5 Handenhet under utbildningen.
- ☞ Om du är vårdnadshavare och installerar appen för den du har vårdnaden för ska du skapa ett Omnipod-ID för den personen.
- ☞ Gå igenom skärmbilderna om samtycke där du hittar information om behandlingen av dina personuppgifter.

Ditt Omnipod-ID är klart när du ser bekräftelsemeddelandet.

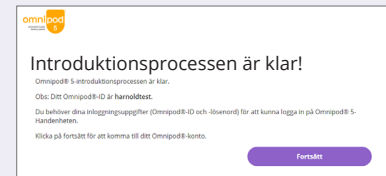

[‡] FreeStyle Libre 2 Plus- och Dexcom G6-sensorer skrivs ut separat. Dexcom G6-sensorn måste användas med Dexcom G6-appen för mobiltelefon. Dexcom G6-mottagaren är inte kompatibel.



Ansluta till Glooko®

Glooko är plattformen för hantering av data från Omnipod 5. Med den kan du:

- Se glukos- och insulindata
- Dela realtidsdata med din vårdgivare som tillförlitligt underlag för justeringar av systemet
- ☞ Om din vårdgivare ska kunna se dina glukos- och insulindata måste du först koppla ditt Omnipod-ID till ditt Glooko-konto.
Om du inte har ett Glooko-konto kan du skapa ett när du installerar Omnipod-systemet.
- ☞ Be din vårdgivare om klinikkens ProConnect-kod så att du kan dela dina diabetesdata med kliniken.

ProConnect-kod:

**Nu är du redo att starta din Omnipod 5
-produktutbildning!**



2. På utbildningsdagen

Som förberedelse för att börja använda Omnipod 5, följ vägledningen från din vårdgivare om ändringar av din aktuella behandling. Du behöver få skriftlig information om insulininställningarna för din behandling. Det är ett krav för att du ska kunna dela i digital start av Omnipod 5.

Omnipod 5 Startkit

- ☞ **Om du får utbildningen digitalt** behöver du i förväg få ett Omnipod 5 Startkit och en kartong med Omnipod 5 Podar. Du kommer också att behöva en injektionsflaska med snabbverkande insulin som din vårdgivare skriver ut.

ELLER

- ☞ **Om du får utbildningen på sjukhuset** ska du kontrollera med vårdgivaren att du får ditt Omnipod 5 Startkit och kartongerna med Omnipod 5 Podar när utbildningen börjar eller att de skickas hem till dig så att du kan ta med dem till utbildningen. Kom ihåg att hämta ut och ta med det snabbverkande insulin som du har fått utskrivet för att använda med Omnipod 5.

Om du väntar på att få ditt Omnipod 5 Startkit och Podarna och de inte har kommit 3 dagar före utbildningen ska du kontakta enheten som ansvarar för beställning och leverans av tillbehör i din region.

Sensorer

Dexcom G6-sensor

- När du kommer till utbildningen ska du bära en aktiv Dexcom G6-sensor som använder Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone. Du ska också noga kontrollera att din mottagare är avstängd.


FreeStyle Libre 2 Plus-sensor

- Kontrollera att vårdgivaren har skrivit ut FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer åt dig.
- Ta med en ny, öppnad FreeStyle Libre 2 Plus-sensor till Omnipod 5-utbildningen.

Insulin

- Kom ihåg att ta med en injektionsflaska eller ampull med snabbverkande insulin* till utbildningen.

Exempel på placering av Pod och Sensor*

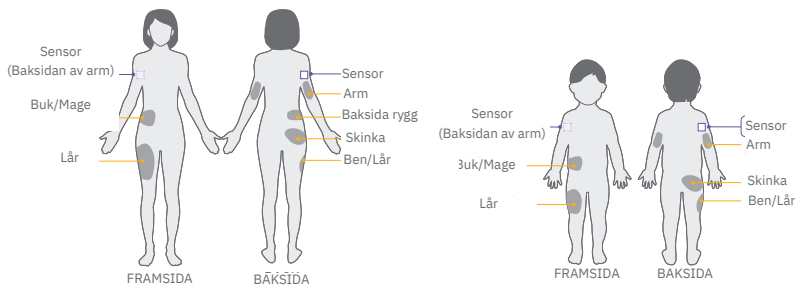

*Exemplen på placering av Poden bygger på att Sensorn fästs på baksidan av armen.

I bruksanvisningen till sensorsystemet finns mer information om godkända placeringar av sensorn.

Ett gott råd: Tänk redan från början på att Poden och Sensorn bör placeras med fri siktlinje mellan varandra för bästa anslutning. Fri siktlinje betyder att Poden och Sensorn ska bäras på samma sida av kroppen, så att de två enheterna kan "se" varandra utan att kroppen blockerar kommunikationen mellan dem.




*NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insulin aspart Sanofi®, Kirsty® och Admelog®/Insulin lispro Sanofi® är kompatibla med Omnipod 5-systemet för användning upp till 72 timmar (3 dagar).

3. Checklista och resurser

Checklista

- Har du skapat ett Omnipod-ID och ett lösenord?
- Har du fått bekräftelse på skärmen om att du är klar med ditt Omnipod-ID? Har du fått ett bekräftelsemej?
- Har du snabbverkande insulin i flaska eller ampull att ta med till utbildningen?
- Har du en aktiv Dexcom G6-sensor kopplad till Dexcom G6-appen på en kompatibel smartphone och har du kontrollerat att din mottagare är avstängd?
ELLER
- Har du en öppenad FreeStyle Libre 2 Plus-sensor som du kan aktivera under utbildningen?
- Har du inställningarna till din insulinpump nerskrivna? Det är ett krav för att delta i utbildningen och för att använda Omnipod 5. Du ska ha fått inställningarna till insulinpumpen bekräftade av din vårdgivare.

Resurser

-  Använd de digitala utbildningsresurserna för att vara helt förberedd inför din Omnipod 5-produktutbildning. Följ anvisningarna från din vårdgivare om de digitala resurserna.



Här finner du de digitala resurserna



Om du har frågor om ditt Omnipod-ID eller Omnipod 5-system som du inte får svar på under online-utbildningen kan du kontakta Nordic Infucare Omnipod Support på

08-601 24 40*

eller +46 (0) 8-601 24 40 om du ringer från utlandet.

Om du har frågor om din behandling ska du vända dig till ditt diabetesteam.

*Ditt samtal kan övervakas och spelas in för kvalitetsövervakning.

©2024 Insulet Corporation. Omnipod, Omnipod-logotypen Simplify Life och Podder är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Insulet Corporation i USA och andra jurisdiktioner. Med ensamrätt. Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. och används med tillstånd. Sensonics hölje, FreeStyle, Libre och relaterade varumärken tillhör Abbott och används med tillstånd. Glooko är ett varumärke som tillhör Glooko, Inc. och används med tillstånd. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Netherlands. www.mymnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 INS-OHS-07-2024-00056 OMNI.SE.124-01-JUN2024 



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se
facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | [@makingdiabeteseasier_se](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_se)

NordicInfu Care AB (Distributör) · Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com

